

REF. 5.004.000.321

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR \_ Color Azul



**BFE ≥ 98%** Certificada según la norma UNE EN 14683:2019.

Mascarilla tipo IIR color azul, utilizada para limitar la transmisión de agentes infecciosos desde el personal médico hasta los pacientes durante procedimientos quirúrgicos y otros entornos médicos con requisitos similares.

- > Filtración bacteriana 98,04% (≥98) - Respirabilidad 28 Pa/cm<sup>2</sup> (≤60)
- > Mascarilla de un solo uso
- > **Certificación AENOR** (Referencia: 46511/21/626)
- > 3 capas en total. 2 capas de TNT Spunbond 100% PP de 40 y 25 g. + capa central de Meltblown 100% PP de 25 g.
- > Mascarilla esterilizada mediante sistema UV
- > Caducidad de 2 años
- > Diseño ergonómico, adaptable a cualquier rostro
- > Gomas elásticas y suaves, no irritan la piel
- > Pinza nasal para perfeccionar el ajuste
- > Sin látex
- > Sin grafeno
- > Mascarilla para adultos
- > Fabricado en Galicia, España

#### IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Unidades por pack	Packs por caja	Cajas por palet
50	48	20

- > Envase individual (pack) con dos idiomas, español e inglés
- > Envase individual (pack) con adhesivo inviolable
- > Marcado CE
- > Código de barras EAN
- > Medidas Caja exterior 60x40x40 cm



#### NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- > **Reglamento 2011/10/CEE.** Referido sobre los materiales plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos, estudiando sus límites de migración.
- > **ISO 10993-10:2010.** Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 10: Ensayos de irritación y sensibilización cutánea.

## INSTRUCCIONES DE USO

- > Comprobar el estado de la mascarilla y la fecha de caducidad antes de su uso
- > Caducidad 2 años
- > Almacenar en su envase original en un lugar limpio y seco, entre -10°C y +30°C de temperatura
- > Conservar a una humedad relativa <80%
- > Lavarse las manos antes de colocar la mascarilla
- > Colocar la mascarilla sujetando las gomas
- > No usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h
- > Ajustar a la nariz y cubrir la barbilla
- > Retirar sujetando las gomas
- > Desechar según la normativa en vigor