

MASCARILLA FFP2 NR CUME1



Mascarilla de protección FFP2 categoría III, sin válvula de exhalación, no reutilizable (NR). Diseñada para proteger contra partículas, aerosoles líquidos y sólidos y patógenos presentes en el medio ambiente.

Recomendada para su uso en entornos médico-sanitarios o por cualquier usuario que se encuentre en un entorno nocivo. Garantiza la protección de las vías de entrada facial; boca, nariz y vías respiratorias.

Cumple con la normativa EN 149: 2001 + A1: 2009 aplicable a los equipos de protección individual (EPI). Tiene certificado CE 0161.

- > Mascarilla de un solo uso
- > **Certificación AITEX** (Referencia: 21/4451/00/0161)
- > 5 capas en total.
 - Capa 1 TNT Spunbond 100% PP de 50 g / m2
 - Capa 2 Filtro TNT en polipropileno fabricado por la técnica Meltblown, 25 g / m2
 - Capa 3 "Hot Air Cotton" con 50% PP & 50% PE, 45 g / m2
 - Capa 4 Filtro TNT en polipropileno fabricado por la técnica Meltblown, 25 g / m2
 - Capa 2 Filtro TNT Spunbond 100% PP de 30 g / m2
- > Filtración total al interior: 6%
- > ≥94% Filtración para la contaminación de partículas.
- > Mascarilla esterilizada mediante sistema de túnel UV.
- > Caducidad de 2 años
- > Diseño ergonómico, adaptable a cualquier rostro
- > Gomas elásticas y suaves, no irritan la piel
- > Pinza nasal para perfeccionar el ajuste
- > Sin látex
- > Sin grafeno
- > Mascarilla para adultos. Medidas 106x155mm.
- > Fabricado en Galicia, España

IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Unidades por pack	Packs por caja	Cajas por palet
25	30	20


- > Envasadas en plástico unitariamente, marcado lote, caducidad, referencia y código de barras.
- > Envase pack cartón con dos idiomas, español e inglés
- > Envase pack cartón con adhesivo inviolable
- > Marcado CE
- > Código de barras EAN
- > Medidas Caja exterior 60x40x40 cm
- > Color: **Blanco** REF. **5.003.001.011**
- > Color: **Blanco/Negro** REF. **5.003.001.981**
- > Color: **Negro** REF. **5.003.001.991**

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- > Norma **UNE EN 149:2001+A1:2009**. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con el certificado Nº 21/4451/00/0161. Organismo notificado 0161 - AITEX
 - > Marcado CE conforme al Reglamento **UE 2016/425** relativo a los equipos de protección individual con número de organismo notificado 0161
-

INSTRUCCIONES DE USO

- > Comprobar el estado de la mascarilla y la fecha de caducidad antes de su uso
- > Almacenar en su envase original en un lugar limpio y seco, entre -20°C y +38°C de temperatura
- > Conservar a una humedad relativa <80%
- > Colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:
 - 1- Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla
 - 2- Identificar la parte superior de la mascarilla
 - 3- Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz
 - 4- Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de cabeza o anudarlo detrás de la misma, a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos
 - 5- Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla
 - 6- Verificar que la mascarilla cubre la barbilla
 - 7- Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz
 - 8- Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias
 9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos

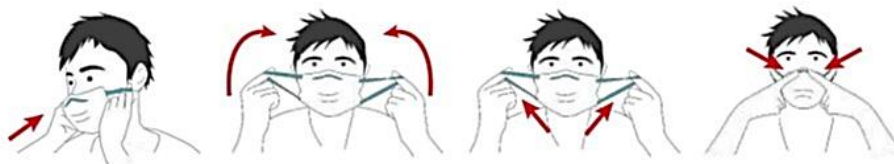

Si va a utilizar la mascarilla **junto a otros elementos de protección siga el orden siguiente:*

bata, gorro, calzas, mascarilla, gafas y guantes

> **Retirada de la mascarilla**

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica;
2. retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla;

- > No usar la mascarilla por un tiempo superior a 8 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra nueva